

GUIA RÁPIDO DE USO


Eyer

Retinógrafo Portátil



DESEMBALE E CONECTE

1

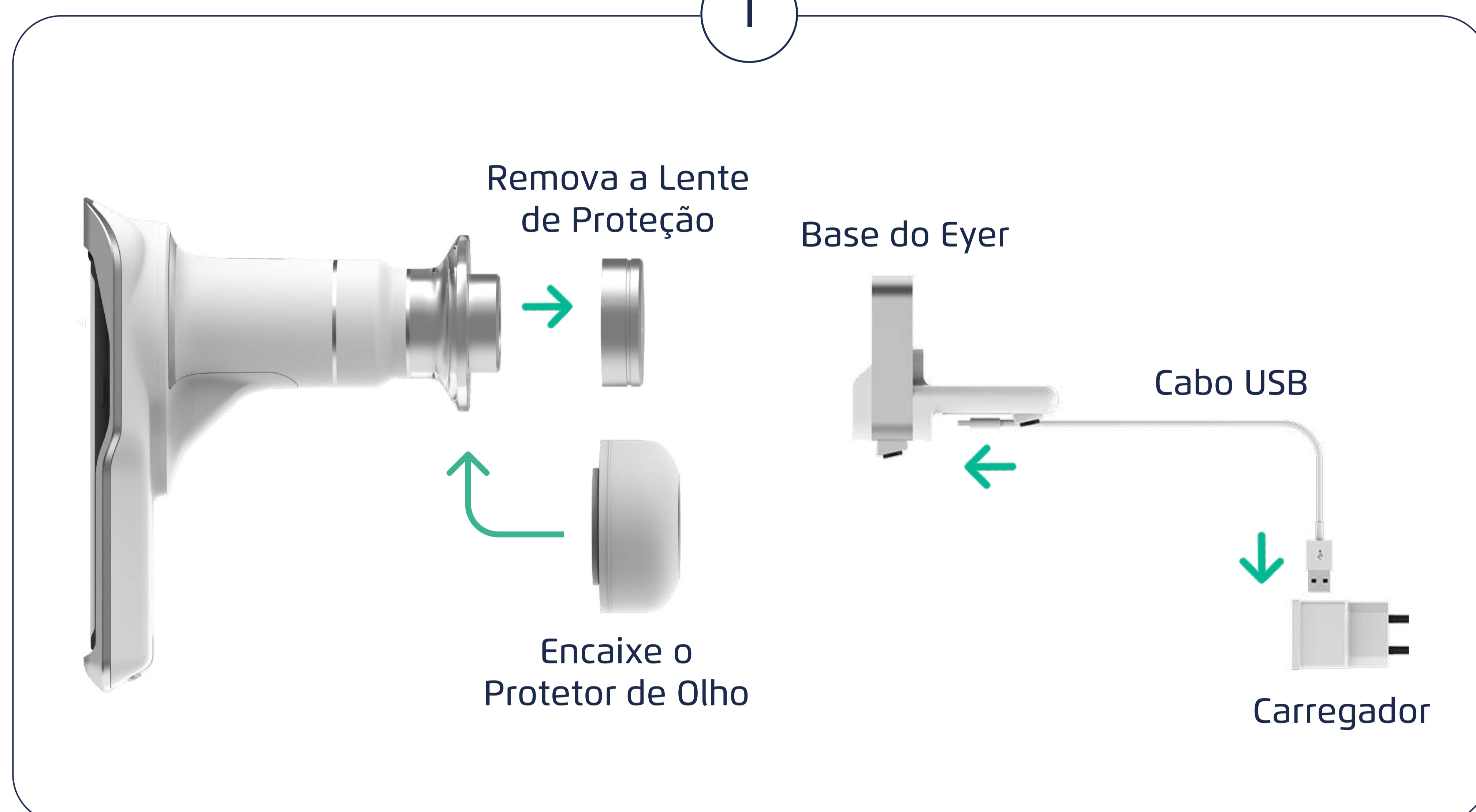

2

Coloque o Eyer na base






3

Inicie o seu Eyer




4

Deslize a tela para baixo, clique e segure no ícone do Wi-Fi e conecte à sua rede de internet.

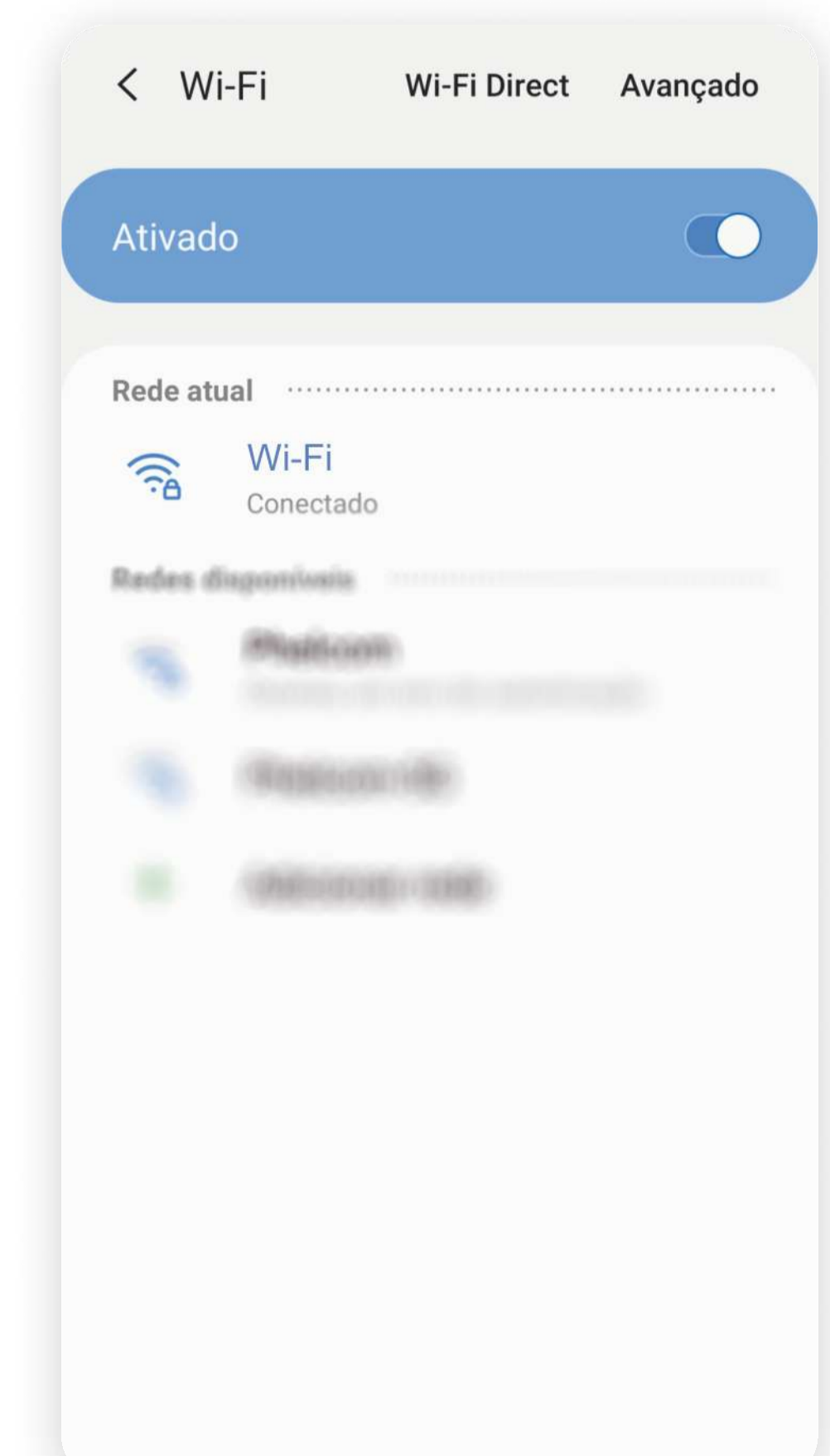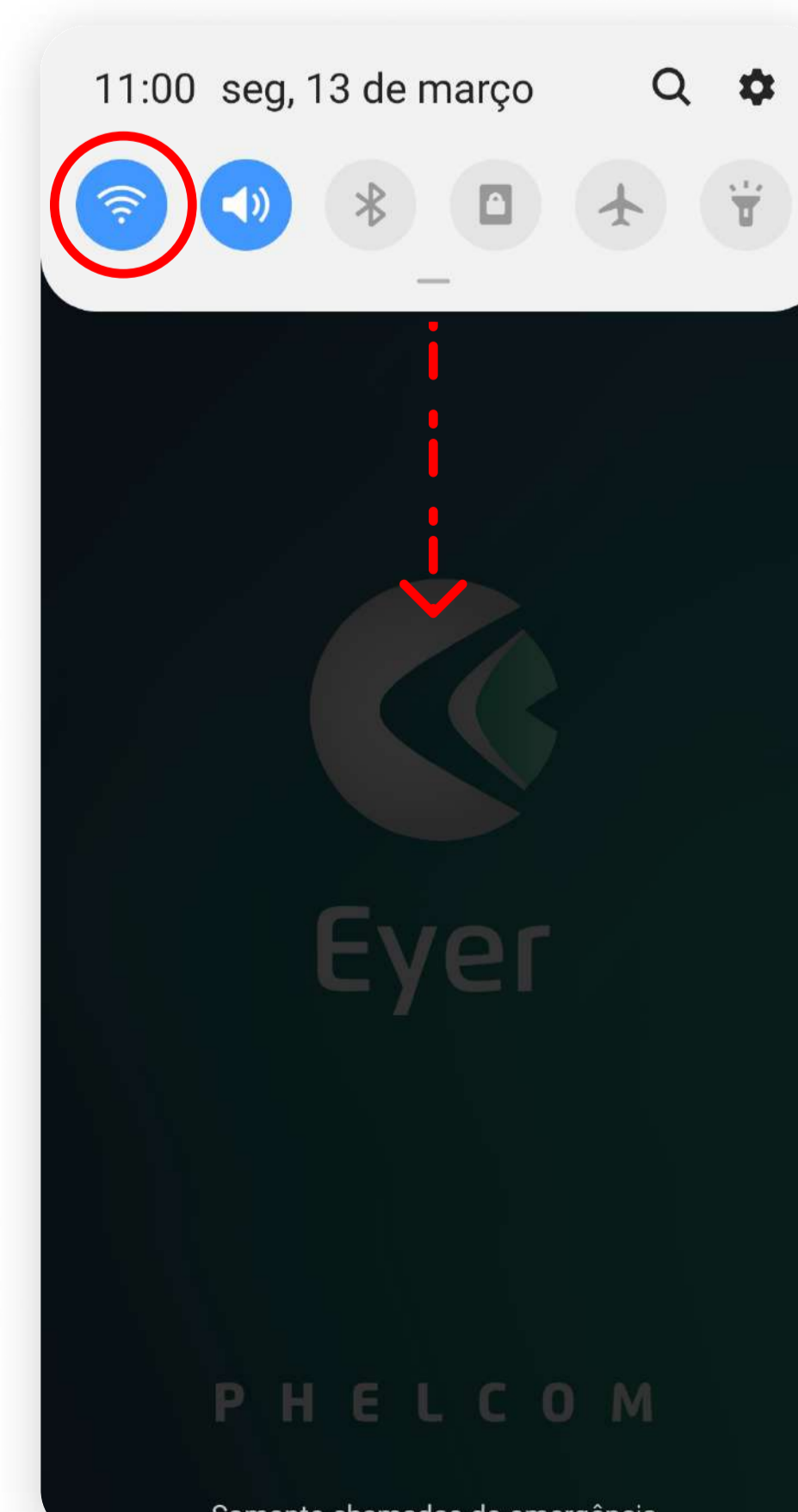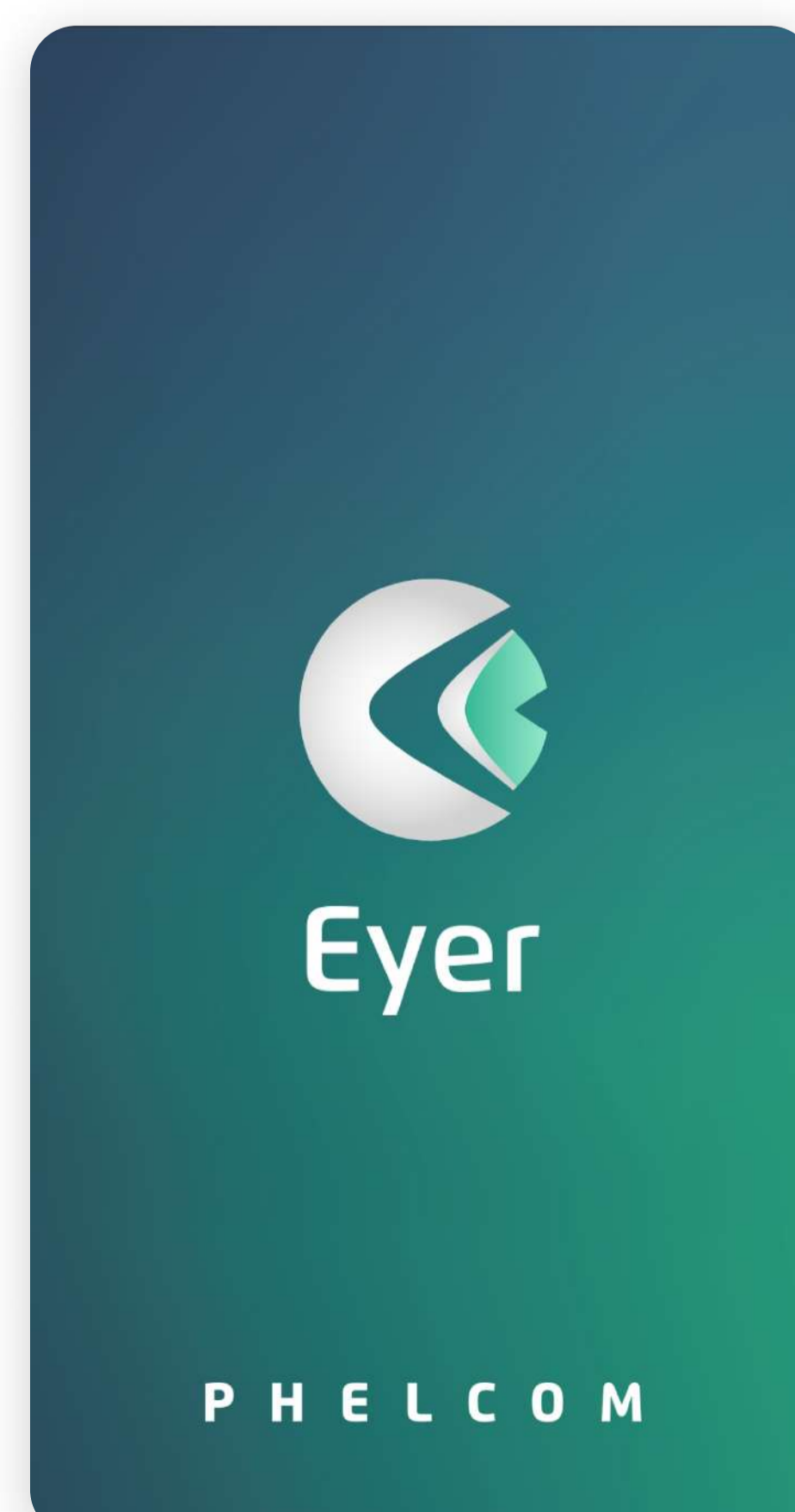


7

Abra o aplicativo do Eyer e realize o login

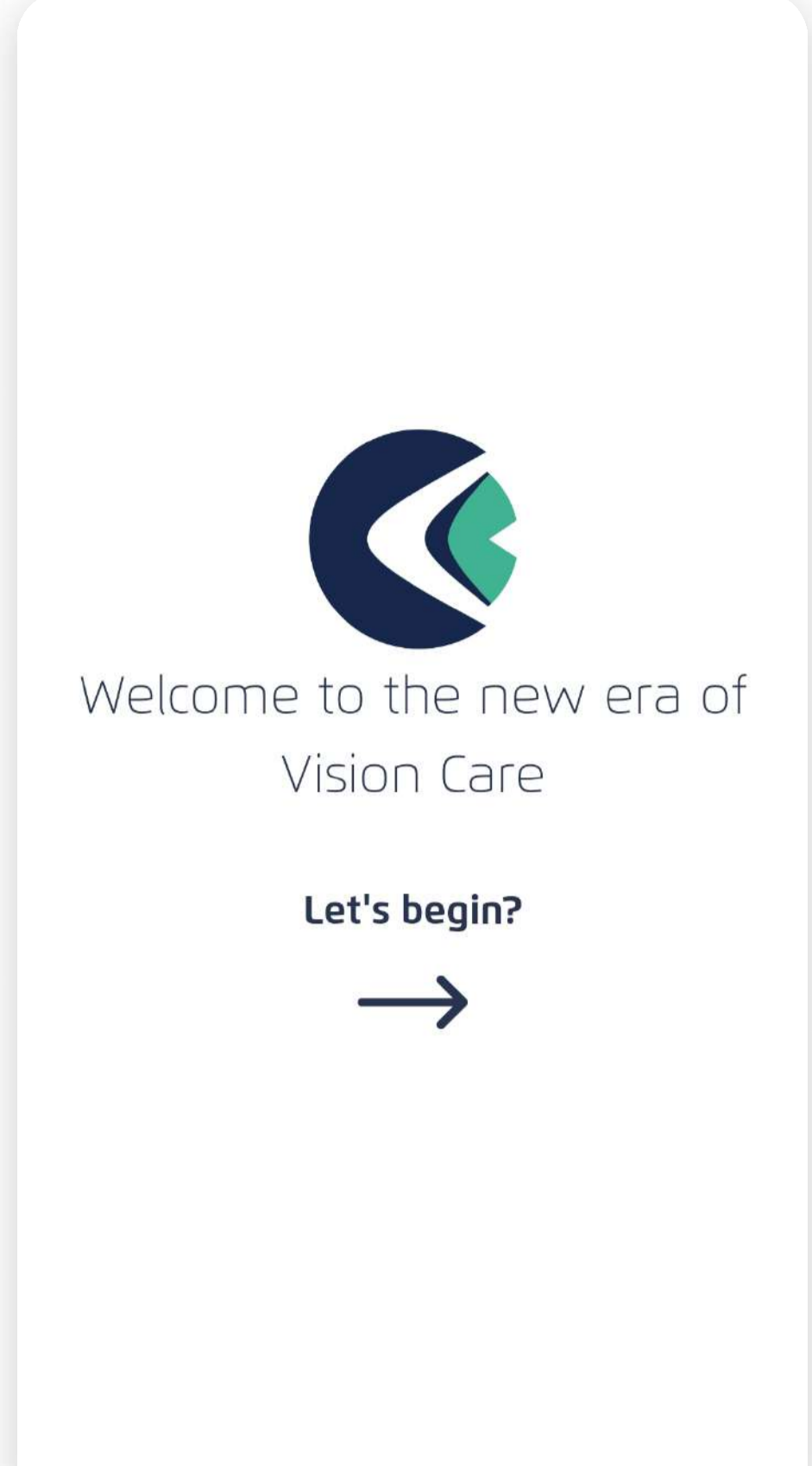


IDIOMA

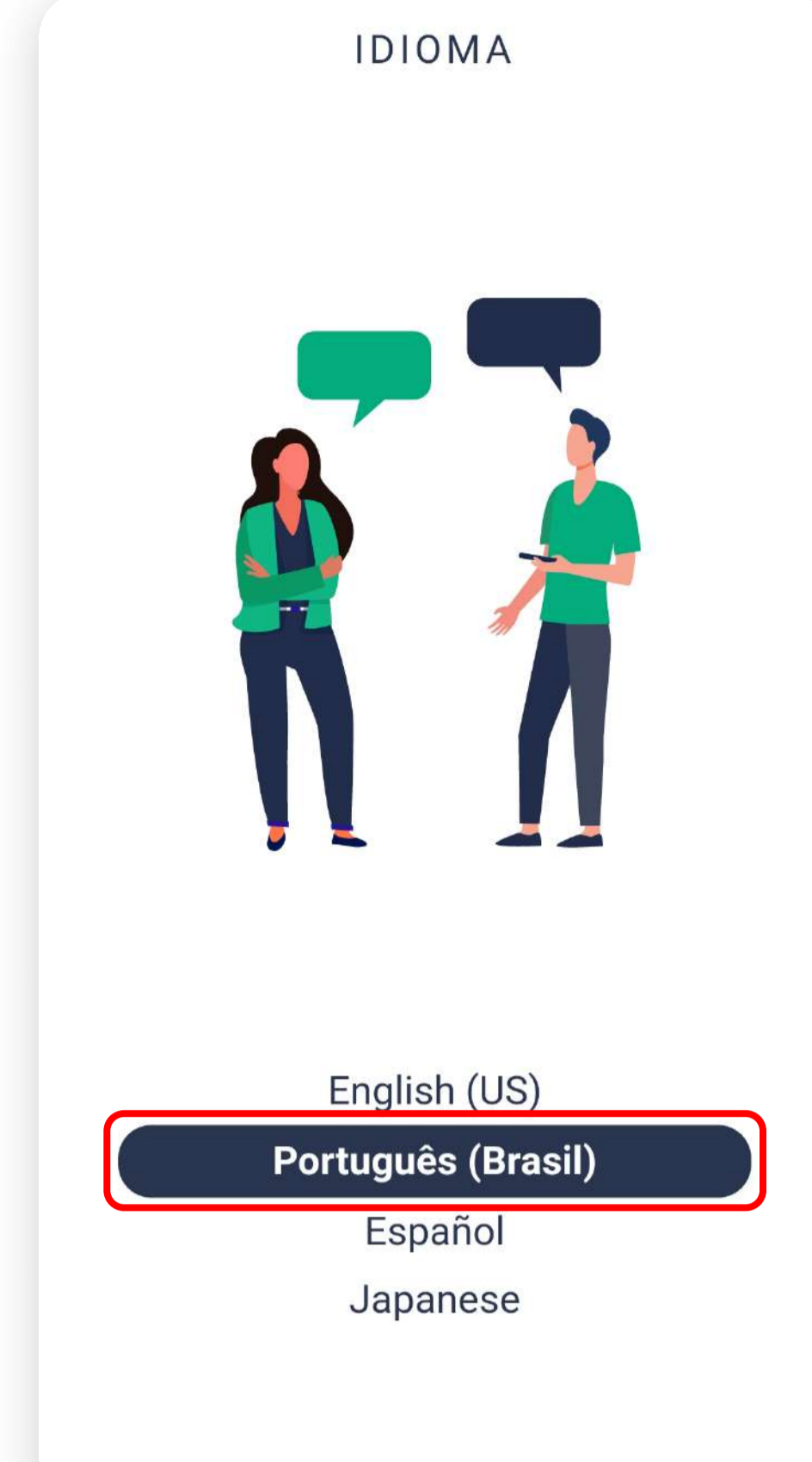

English (US)
Português (Brasil)
Español
Japanese

TERMOS E CONDIÇÕES

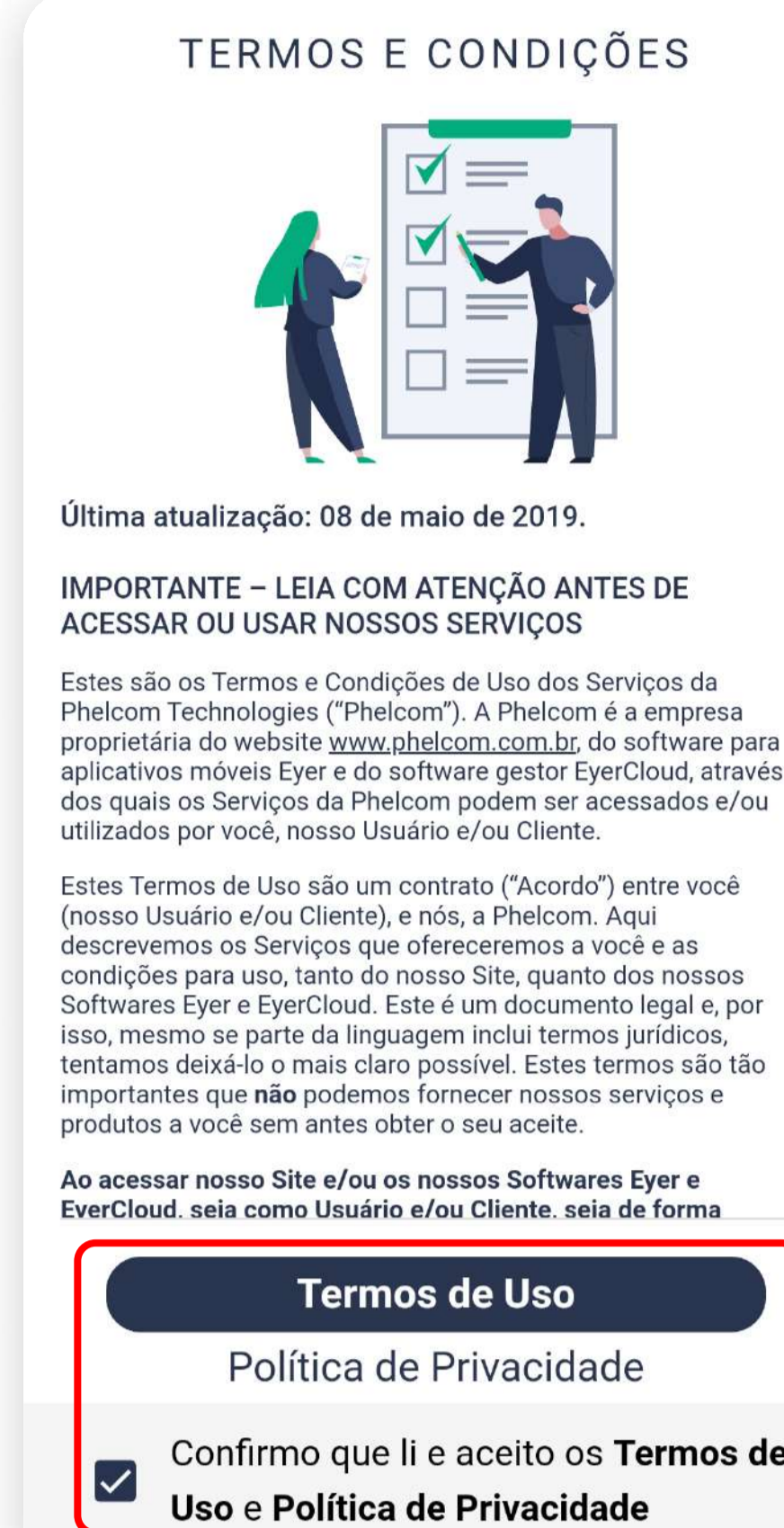

Última atualização: 08 de maio de 2019.

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE ACESSAR OU USAR Nossos SERVIÇOS

Estes são os Termos e Condições de Uso dos Serviços da Phelcom Technologies ("Phelcom"). A Phelcom é a empresa proprietária do website www.phelcom.com.br, do software para aplicativos móveis Eyer e do software gestor EyeCloud, através dos quais os Serviços da Phelcom podem ser acessados e/ou utilizados por você, nosso Usuário e/ou Cliente.

Estes Termos de Uso são um contrato ("Acordo") entre você (nosso Usuário e/ou Cliente), e nós, a Phelcom. Aqui descrevemos os Serviços que ofereceremos a você e as condições para uso, tanto do nosso Site, quanto dos nossos Softwares Eyer e EyeCloud. Este é um documento legal e, por isso, mesmo se parte da linguagem inclui termos jurídicos, tentamos deixá-lo o mais claro possível. Estes termos são tão importantes que não podemos fornecer nossos serviços e produtos a você sem antes obter o seu aceite.

Ao acessar nosso Site e/ou os nossos Softwares Eyer e EyeCloud, seja como Usuário e/ou Cliente, seja de forma

Termos de Uso
Política de Privacidade

Confirmando que li e aceito os **Termos de Uso e Política de Privacidade**



CRIANDO A CONTA NO EYER

10

VEJA O TUTORIAL



11

DADOS DO USUÁRIO

Nome

Sobrenome

Nome da clínica

País

12

DADOS DE SEGURANÇA

Email

Confirmar email

Senha

Confirmar senha

PIN

Confirmar PIN

(Use oito ou mais caracteres com uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos)

(Senha numérica, será utilizada para acessar o dispositivo. Use 4 ou mais dígitos)

13

VERIFICAÇÃO DE CONTA

O código de verificação foi enviado para o email `Seu_email@email.com`

0 0 0 0 0 0 0 0


CONFIRMAR

Reenviar o código de verificação em 59 segundos

REENVIAR

14

Confira o código enviado no seu e-mail

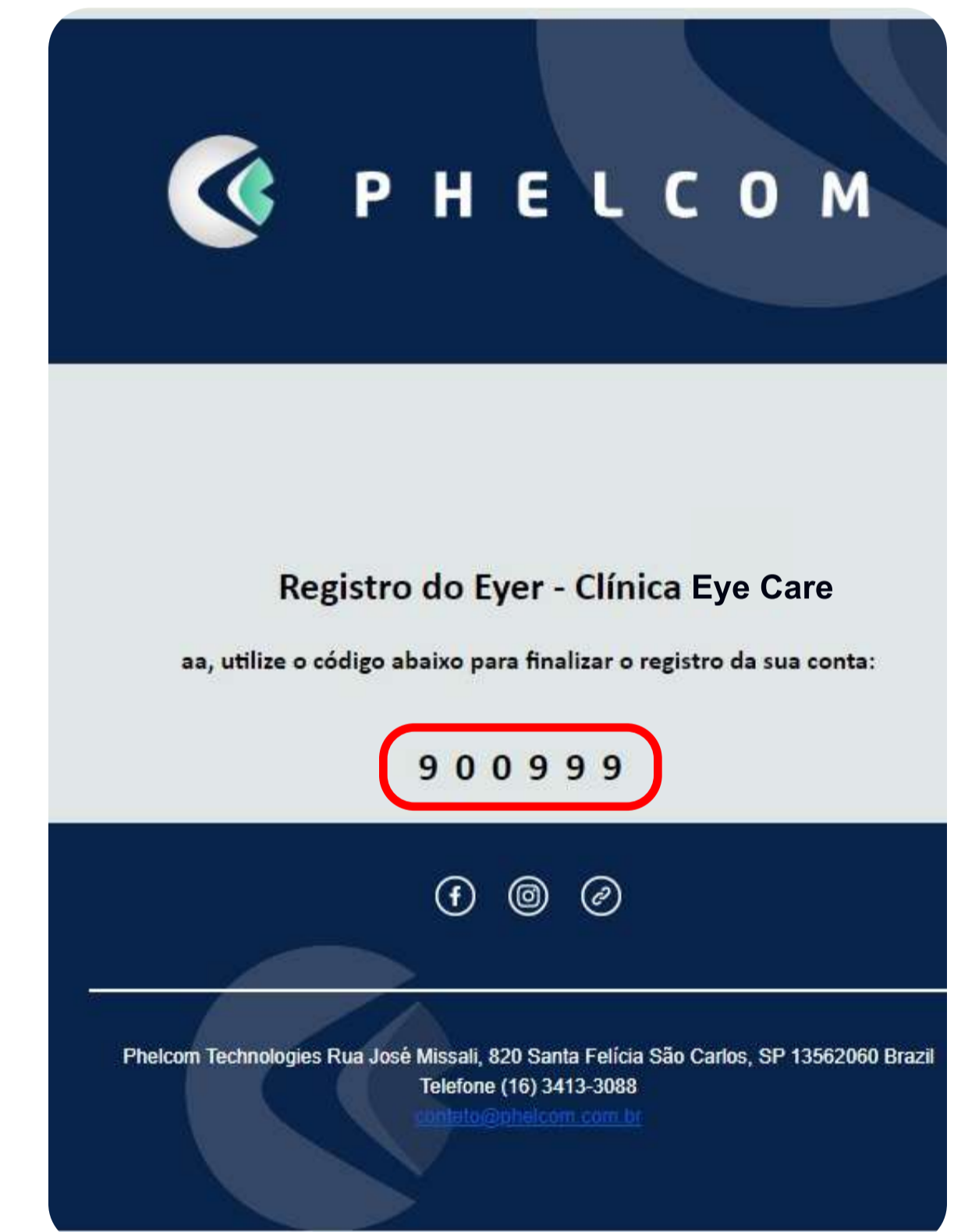


CAPTURA RÁPIDA


Como segurar o Eyer



15

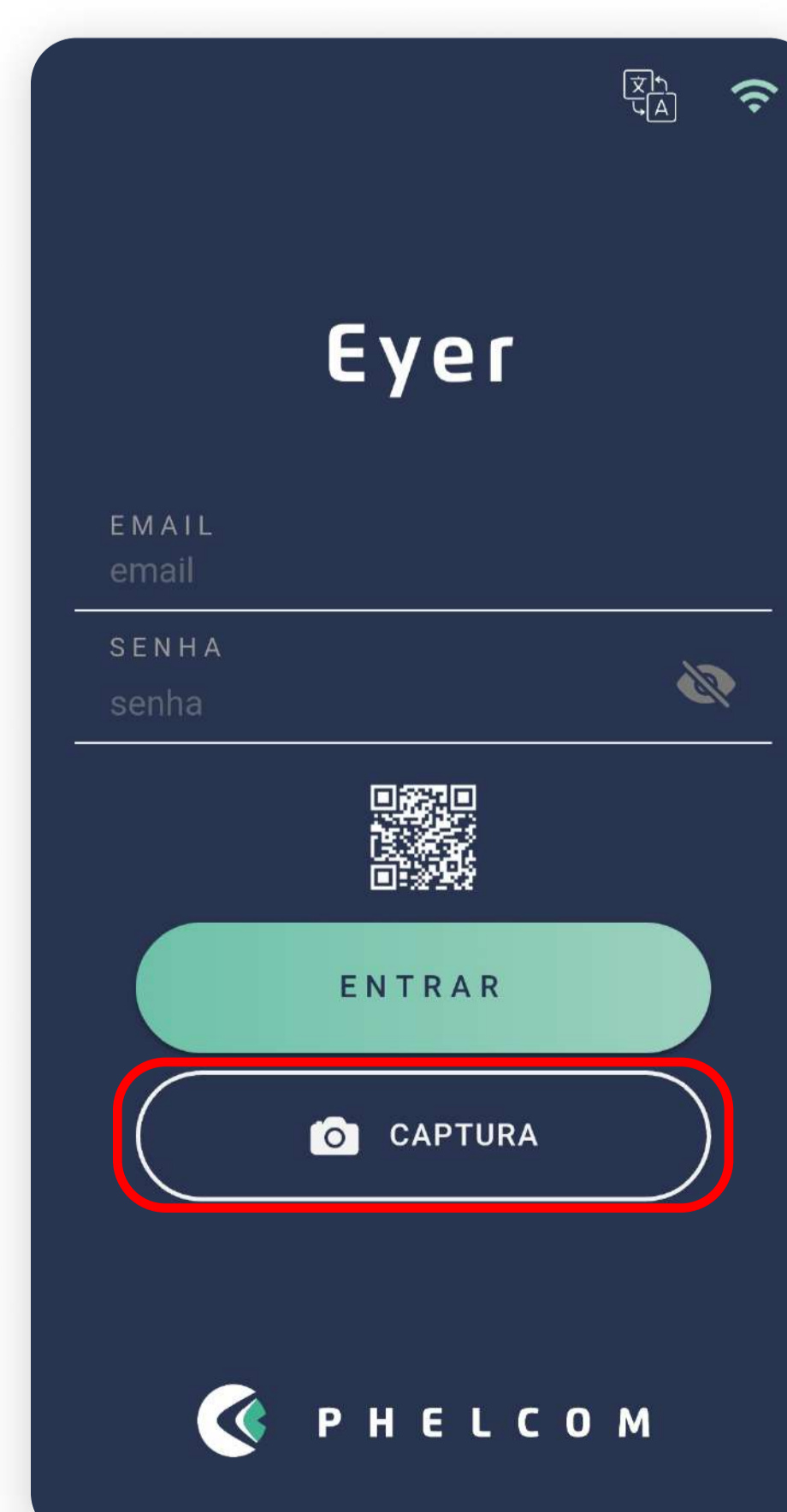

16

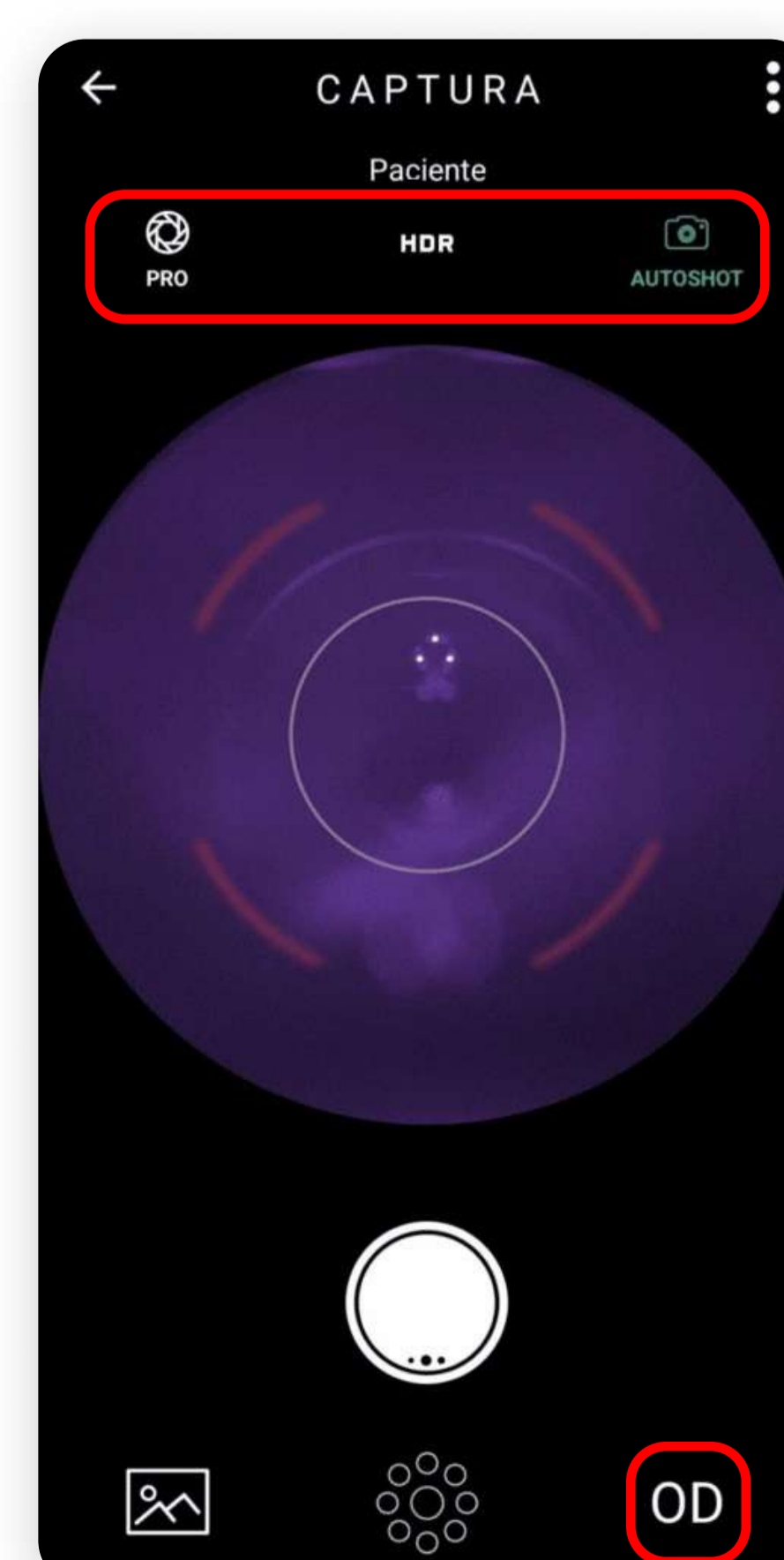

- Autoshot ON/OFF (PADRÃO ON)
- HDR ON/OFF (PADRÃO OFF)
- Acesse o Modo PRO para controlar luz, foco e alternar para capturas de segmento anterior

- OD Olho Direito
- OE Olho Esquerdo

17

Símbolo	Significado
OD	Olho Direito
OE	Olho Esquerdo
HDR	High Dynamic Range
	Autoshot
	Galeria
	Captura (Manual)
	Pontos Internos de Fixação
	Modo PRO

18

19

Acesse a sua conta

Login da Clínica

Login do Usuário

CRIANDO PACIENTES

20

21

22

23

24

ACESSANDO O EYERCLLOUD

25

26

27

25

26

Acesse a plataforma EyerCloud pelo link:

eyercloud.com

28




29



30

Gerando laudos no EyerCloud

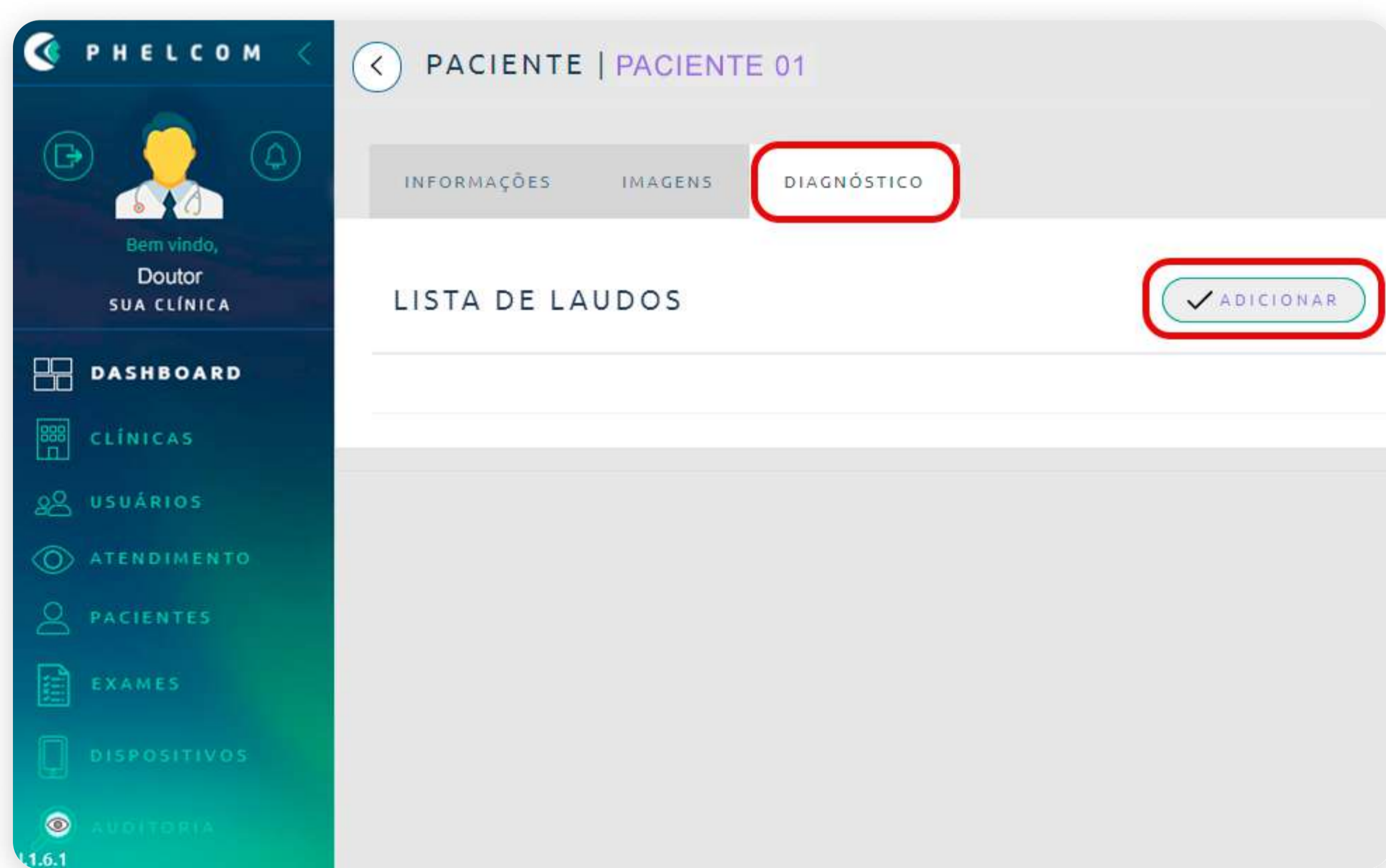

Escaneie o QR Code para acessar o Tutorial



GUIA RÁPIDO DE USO

phelcom.com | support@phelcom.com

Produto incentivado pela lei de informática.

